



PELLA

Transparent Crown Forms

Moules pour couronnes transparents

For the « peel-off » technique
Pour la technique « peel-off »

78 Shapes . 78 formes

39 right (R) yellow . 39 droite (R) jaune

39 left (L) pink . 39 gauche (L) rose

Rack of 6 detachable plastic box
for individual pairs

Jeux de 6 boîtes détachables
pour paires individuelles



6-pack box
Boîte 6-pack

Directions for use

« Peel-off » for making individual jacket crowns
of synthetic resin in the mouth of the patient

Mode d'emploi

Type détachable « peel-off » pour la confection
en bouche de couronnes individuelles en résine synthétique



- 1 Prepare stump in the same manner as for porcelain jacket crowns. Make undercuts.
Préparer le moignon de la dent comme pour une couronne Jacket en porcelaine. Ménager des rétentions.



- 2 Trim Crown Form on the cervical portion to fit stump.
Découper le moule choisi dans sa partie cervicale pour l'adapter au moignon.



- 3 Fill Crown Form with polymerisable resin (follow the directions for use of the manufacturer).
Remplir le moule avec la résine polymérisable de la teinte choisie (voir le mode d'emploi du fournisseur).



- 4 Fit the filled Crown Form. Let excess ooze out. Hold Crown firmly in position.
Mettre le moule en place en laissant sortir l'excès. Le tenir fermement.



- 5 Wait until the resin has hardened (follow the directions for use of the manufacturer).
Attendre jusqu'au durcissement complet de la résine (voir le mode d'emploi du fournisseur).



- 6 When completely hard, slit the Crown Form on the approximal or lingual side and peel off the Crown Form.
Lorsque la résine est complètement durcie, fendre le moule côté proximal ou lingual et décortiquer la couronne.




- 7 Polish the finished acrylic crown.
Polir la nouvelle couronne en résine.



- 8 The new acrylic crown is complete.
La nouvelle dent en résine est terminée.


Upper centrals (normal forms)

**Incisives supérieures
(formes normales)**

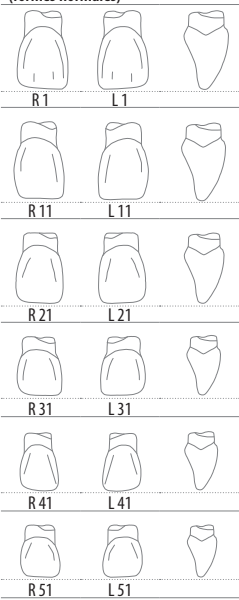


Upper centrals (cervical part enlarged)

**Incisives supérieures
(partie cervicale élargie)**

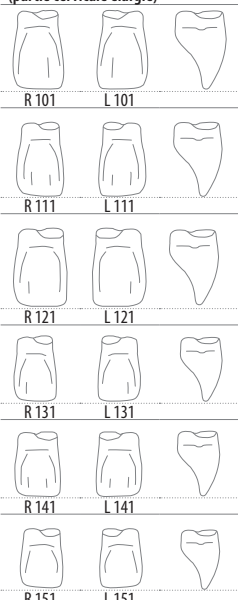


Upper laterals

Incisives latérales supérieures

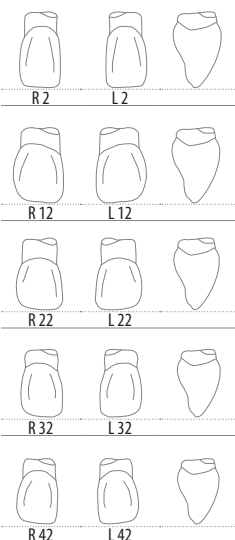


Lower incisors

Incisives inférieures

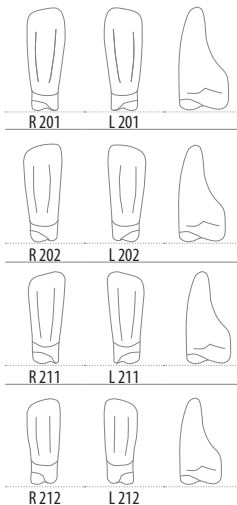


Upper extra-large canines

Canines extra-grandes supérieures

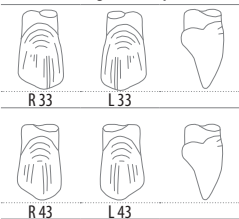


Extra-large centrals


Incisives extra-grandes

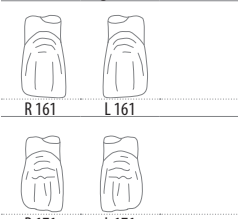


Molars . Molaires

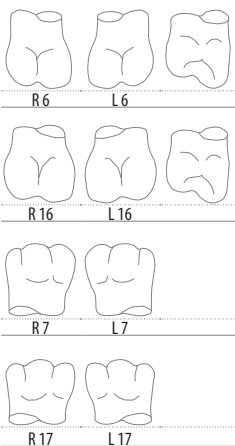


Bicuspid . Prémolaires

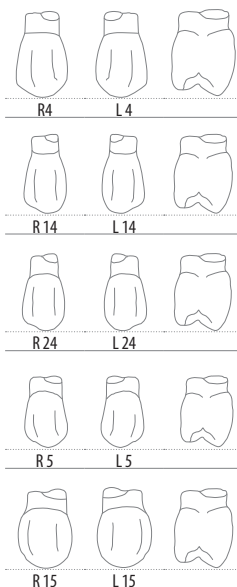

Upper canines . Canines supérieures

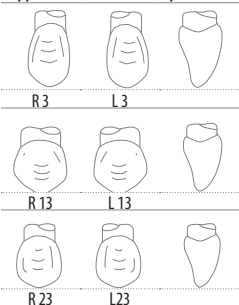

Lower canines . Canines inférieures

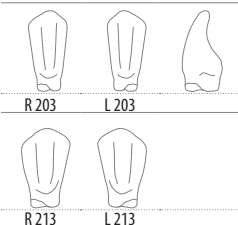

Refill : 6-pack box = 6 paires . Recharge : boîte 6-pack = 6 paires

R/L	REF	R/L	REF	R/L	REF	R/L	REF	R/L	REF
1	33421	12	33501	23	33581	51	33661	171	33741
2	33431	13	33511	24	33591	101	33671	201	33751
3	33441	14	33521	31	33601	111	33681	202	33761
4	33451	15	33531	32	33611	121	33691	203	33771
5	33461	16	33541	33	33621	131	33701	211	33781
6	33471	17	33551	41	33631	141	33711	212	33791
7	33481	21	33561	42	33641	151	33721	213	33811
11	33491	22	33571	43	33651	161	33731		

Box . Coffrets

.78 crowns (39 paires) . 78 moules (39 paires)

Assortiment of 18 pairs . Assortiment de 18 paires

RL 1, 11, 21, 31, 41, 51, 101, 111,
121, 131, 2, 12, 22, 32, 3, 13, 23, 5

REF

33410

33405

